


子宮頸部 細胞採取方法

監修：医学博士 長谷川 壽彦 先生

公益財団法人 東京都予防医学協会 学術顧問
国立病院機構栃木医療センター 名誉院長

BD シュアパス™ 法 (BD シュアパス™ コレクションバイアル)

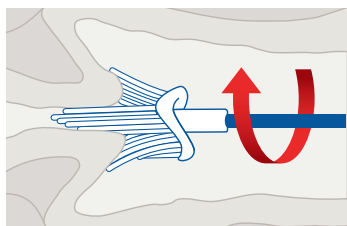

サーベックスブラシ™ の肩部を子宮口に軽く押し当ててから**時計方向に5回転**させてください。


開口部端に先端を引っかけて柄を引き抜いてください。

※エンドサーベックスブラシ™ は蓋ではさんで柄を引き抜いてください。

蓋をしっかり締めて提出してください。

採取時のお願い

- 採取部位が粘液や帯下で覆われている場合はシリンジで頸管部を吸引し、表面を綿球などで拭って**粘液や帯下を取り除いてから**細胞を採取してください。

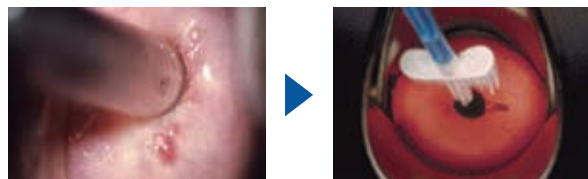

- ブラシは弾力性がありますので軽く押し当てるだけで十分な細胞量がとれます。**押し当てすぎに注意してください。**
- 細胞を的確に採取するため採取前に多少出血する旨を受診者に説明してください。

直接塗抹法 (コンベンショナル)



ブラシ両面をすばやく均一に塗抹します。提出先の固定方法に従って固定し、提出してください。

※乾燥しないように注意してください。

ブラシ操作

サーベックスブラシ™、サーベックスブラシ™ コンビはブラシ先端が半円弧状となっており、**時計方向に回転**させることにより的確に細胞を採取します。



サーベックスブラシ™
滅菌 / 未滅菌【断面】




子宮頸部 細胞採取器具

サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌 注1)



※妊娠 10 週目以降の妊婦には使用しないでください。

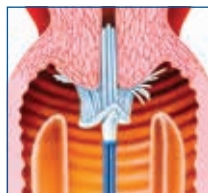

SCJ[®]を中心とした子宮腔部および子宮頸管入り口


- ① 子宮頸管部にサーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌の中心を挿入します。
- ② ブラシの肩部を子宮口に**軽く**押し当ててから**時計方向に 5 回転**させてください。
- ③ サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌を静かに抜き取ってください。

※ Squamo-columnar junction; 扁平円柱上皮接合部。

サーベックスブラシ™ コンビ滅菌 / 未滅菌 注2)



※妊婦には使用しないでください。

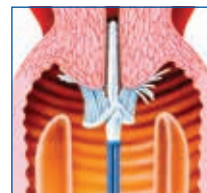

子宮頸管から子宮腔部まで同時に採取

- ① 子宮頸管部にサーベックスブラシ™ コンビ滅菌 / 未滅菌の中心を挿入します。
- ② ブラシの肩部を子宮口に**軽く**押し当ててから**時計方向に 2 回転**させてください。
- ③ サーベックスブラシ™ コンビ滅菌 / 未滅菌を静かに抜き取ってください。

エンドサーベックスブラシ™ 標準タイプ滅菌 / Sタイプ滅菌 注3)




標準タイプ滅菌



Sタイプ滅菌

※妊婦には使用しないでください。

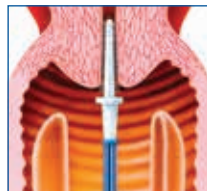

子宮頸管

- ① 子宮頸管部にエンドサーベックスブラシ™ 滅菌を安全リング手前まで挿入します。
- ② **時計方向に 1 回転**させてください。
- ③ エンドサーベックスブラシ™ 滅菌を静かに抜き取ってください。

ご使用前にお読みください

- 使用の際は添付文書を必ずご参照ください。
- 再使用禁止
- 子宮内避妊器具等の装着者には使用しないでください。
- 細胞を採取する際に、腔部への潤滑クリーム等の使用は避けてください。

注1) 製造販売届出番号: 07B1X00003000117 販売名: サーベックスブラシ
注2) 製造販売届出番号: 07B1X00003000118 販売名: サーベックスブラシコンビ
注3) 製造販売届出番号: 07B1X00003000119 販売名: エンドサーベックスブラシ

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

Cervex-Brush、および EndoCervex-Brush は Rovers Medical Devices B.V. の商標です。
© 2019 BD. BD、BDロゴおよびその他の商標は Becton, Dickinson and Company が所有します。
45-007-067

