

平成 22 年 3 月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
ダイアグノスティックシステム事業部

BD センシ・ディスク ホスホマイシン 50 感受性判定値のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品 BD センシ・ディスク に同梱しております添付文書の感受性判定表より BD センシ・ディスク ホスホマイシン 50 (製品番号 291098) の数値が抜けておりましたため、感受性判定値についてご連絡申し上げます。下記表をご参照ください。

この度は、ホスホマイシンの判定についてご迷惑をお掛けすることとなり誠に恐縮に存じます。今後も弊社製品をご愛顧くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

製品番号	製品名	ディスク略号	化療略号	薬剤含有量(ug)	耐性(R)(mm)	中間(I)(mm)	感性(S)(mm)
291098	BD センシ・ディスク ホスホマイシン 50	FF50	FOM	50			
	For Staphylococci				13	14-19	20
	For Enterobacteriaceae and <i>P. aeruginosa</i>				10	11-15	16

*お問い合わせ先：<フリーダイヤル> 0120-8555-90 受付時間 9:00~17:00

音声ガイダンスによりご案内

1 番：受注管理（注文・納期・在庫のお問合せ）

2 番：お客様情報センター（製品に関するお問合せ・カタログご請求など）

ホームページ www.bd.com/jp/