



より安全で正確な踵穿刺により、 新生児・乳幼児にやさしい足底採血を


BD マイクロティナ[®] クイックヒール[™] ランセット

新生児・乳幼児足底採血専用の
完全ディスプレイ自動型ランセットです。



より安全で正確な踵穿刺により、 採血手技によらないやさしい足底採血が可能です。

- 刃が非常に薄く、採血の痛みを抑えます。
- 穿刺深度が一定なので、深すぎる穿刺によって発生する骨髄炎等を防ぎます。
- 白い穿刺ボタンを押すだけで、簡単に作動できます。
- 穿刺後、刃は内部に自動的に格納されて再使用できない構造のため、針刺し損傷や交差感染を防ぎます。

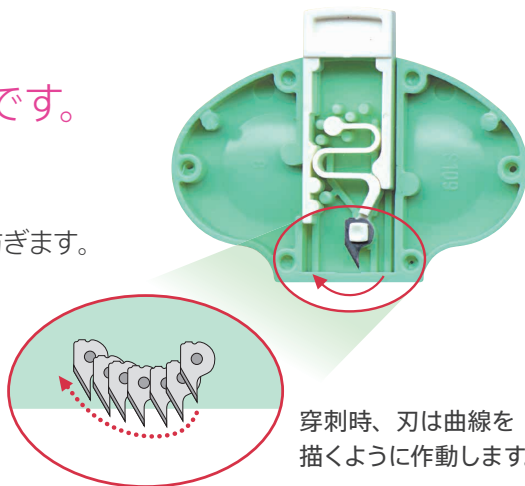

使用方法

- 図の矢印部位を参考に、踵底部の左右側面の肉厚部分のいずれかを穿刺部位として選び、消毒します。
- ロゴマークを手前に向けて持ち、ホルダー下部を穿刺部位に押し当てます。
- 人差し指で白い穿刺ボタンを押します。
- すみやかに廃棄容器に廃棄し、ろ紙に適切な量の血液を採取します。

BD マイクロティナ® クイックヒール™ ランセット

カタログ番号	ホルダーカラー	穿刺の深さ	穿刺の幅	出荷単位	統一商品コード
368102		0.85 mm	1.75 mm	50 個/箱	555392568
368103		1.0 mm	2.50 mm	50 個/箱	555392575

販売名：BD クイックヒール ランセット 医療機器承認番号：20100BZY00107000

すみやかに廃棄容器に廃棄し、微量採血容器を用いて血液を採取します。

関連製品：血液曝露・飛散を防ぐキャップデザインを採用した微量採血管



BD マイクロティナ® 微量採血管
BD マイクロガード™ キャップ付き
幅広いラインナップを揃えた
微量採血管 (全 8 種類)



BD マイクロティナ® MAP 微量採血管
プローブ対応キャップで自動分析器での検査が可能※
底上げ形状によりラベルが貼りやすい
(サイズ：13×75 mm)

※ 採血量やご使用の機器により自動でお使いいただけない場合があります

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

