



Single use is safer use

BD バキュテイナ® 駆血帯

- 単回使用のため、駆血帯汚染による血液感染を防止
- ラテックスフリー
- ミシン目で簡単に切り離し可能
- テクスチャー加工された表面で、使用中にしっかりと保持が可能



カタログ番号	出荷単位	統一商品コード
367198	1本 / 箱 (25 回分)	555581313

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

© 2018 BD. BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが所有します。
62-052-01



使用手順



1. 駆血帯の片側を長目に持ち、腕の裏側に駆血帯を通します。



2. 長目に持った方を下から上に交差させます。



3. 駆血帯を引っ張った状態で交差させたまま、短い方の駆血帯の下にくぐらせて固定します。



4. 採血終了後、挟まれた帯の端をつかみ、引き上げて駆血帯を外します。



BD バキュテイナ® 駆血帯

カタログ番号	出荷単位	統一商品コード
367198	1本 / 箱 (25回分)	555581313

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

© 2018 BD. BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが所有します。
62-126-00

