

機械器具 47 注射針及び穿刺針

管理医療機器 医薬品・ワクチン注入用針 44127010

BD マイクロファインプラス 29G-F

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止。
- 2) 他の人が使用した本品を使用しないこと。[感染症の原因となることがある。]
- 3) 開封後の操作において曲がってしまった針を使用しないこと。[曲がった状態で、または曲がった針を元に戻してから注射すると、針が折れ、破断した針が体内に残留することがある。]


【形状・構造及び原理等】

〈概要〉

本品は、ペン型注入器用注射針であり、JIS T 3226-2: 医療用ペン型注入器第2部: 注射針基準で規定するA型の注射針である。

〈針の寸法〉 29G (0.33mm) × 12.7mm

〈針材質〉 ステンレス鋼

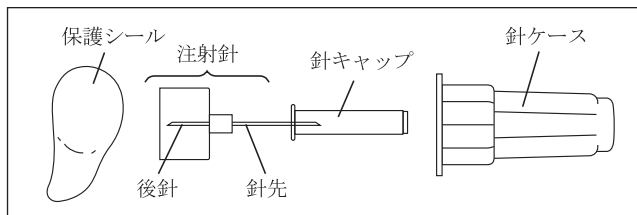

*【使用目的又は効果】

本品は、フォリスチム®注 300IU、同注 600IU 又は同注 900IU カートリッジとともに取り付け、皮下又は筋肉内へ注入するものである。

**【使用方法等】

- * ペン型注入器に取り付けて使用する。
フォリスチムペン®の添付文書及び取扱説明書、フォリスチム®注 300IU、同注 600IU 及び同注 900IU カートリッジの添付文書を読み使用する。
- ** 1) 保護シールをはがす。
注意: 保護シールは使用直前に後針に接触しないように完全に
はがすこと。後針に異常がないことを確認すること。
- ** 2) ペン型注入器に針ケースごとまっすぐ奥まで差込み、止まるまで時計回りに回して確実に取り付ける。[斜めに取り付けると、後針の曲がり・折れによって薬液が出なくなることがある。]
- 3) 針ケースを外し、針先が針キャップに触れないように、針キャップをまっすぐ引っ張って外す。
注意: 注射針が装着しにくい場合や、針ケースが外れにくい場合は、無理に使用しないこと。
- 4) 空打ちを行い、針先から薬液が出ることを確認する。
- ** 5) 注射を行う。
注意: つまみあげ(ピンチアップ)をし、注射針を皮膚面に対し垂直に刺し、穿刺時の状態を保持しながら薬液を注入

すること。[穿刺時や薬液注入時にぶれが生じると針が曲がり、破断することがある。]

- ** 6) 注射後は針ケースの開口部を上にして平らなテーブルの上に針ケースを置き、針を開口部の中へ押し込む。針ケースを反時計回りに回し、針を注入器からははずす。[斜めに付けると針が曲がり破断したり、針ケースを突き抜けることがある。]
注意: 使用後の注射針は、針ケースをかぶせた後、すぐに取り外すこと。その際、針キャップはかぶせないこと。

**【使用上の注意】

**〈重要な基本的注意〉

- ** 1) 一度取り外した針キャップは、注射針に取り付けないこと。[針刺し損傷の可能性がある。]
- 2) 注射前の取り扱いにおいて、針には触れないこと。
- ** 3) 使用前に穿刺部位の消毒を行うこと。[感染のおそれがある。]
- ** 4) 同一箇所への注射を避けること。[皮膚病変が発生するおそれがある。]
- ** 5) 硬結、炎症、浮腫、および感染の兆候が見られる部位へは注射をしないこと。[インスリン吸収への影響、針曲がり・針折れ、および感染の増悪等のおそれがある。]
- 6) 針キャップの取り外し後は、衣服等への接触により針を曲げたり傷つけたりすることがないように十分に注意すること。
- 7) 毎回の注射の前に必ず空打ちを行い、針先から薬液が出ることを確認すること。薬液が出ない場合は、新しい注射針に交換すること。
- 8) 誤って自分や他の人を針で傷つけないように十分注意すること。
- ** 9) 小児の手の届かない場所に保管すること。
- ** 10) 感染防止に留意し、使用済みの注射針を安全な方法で処分すること。

**〈不具合・有害事象〉

その他の有害事象

穿刺部位からの出血、穿刺部位の疼痛、発赤、腫脹、あるいは内出血、金属アレルギー

**【保管方法及び有効期間等】

**〈保管方法〉

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて室温で保管すること。

**〈有効期間〉

使用期限は保護シール、化粧箱に記載。[自己認証(当社データ)による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**
* 製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
TEL：0120-8555-90 (カスタマーサービス)
(受付時間) 9：00～17：00
(土曜、日曜、祝日、当社休日を除く)

**
* 外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー
(Becton, Dickinson and Company)
国名：アメリカ合衆国

販売業者：

MSD 株式会社
〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12
フリーダイヤル：0120-024-961 (MSD カスタマーサポートセンター)