

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 保護栓 70280000

## BD ピュアハブ ネオ

再使用禁止

## 【警告】

1. 火気厳禁 [引火性液体を含有しているため]

## 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 閉鎖式ニードルレスコネクタのメスルアー部のみを使用すること。[開放式コネクタに使用すると製品中のアルコールが輸液ライン中に混入する可能性があるため。]


## \*【形状・構造及び原理等】

本品は、プラスチック製のキャップにイソプロピルアルコール (IPA) を含浸したポリエステルポリウレタン製のスポンジが内蔵されている。本品は滅菌されており、単回使用である。

## 10連タイプもある



(断面図)

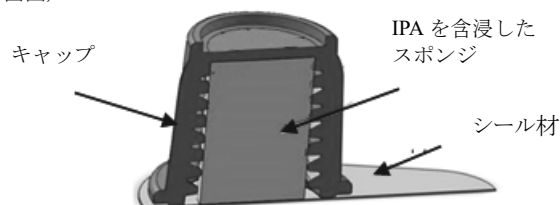

## 【使用目的又は効果】

本品は輸液ラインのニードルレスコネクタに接続して、汚染防止・保護に用いるキャップである。

## \*【使用方法等】

10連タイプは点滴スタンド等にぶら下げることができる。

1. シール材を本品から剥がす。
2. ニードルレスコネクタのメスルアーに本品を押し回して接続する。
3. 本品を取り外し、廃棄する。

## 【使用上の注意】

## 〈重要な基本的注意〉

1. 再滅菌して使用しないこと。
2. 本品は、清潔野や無菌エリアでは使用しないこと。[本品の外側の無菌性は担保されていない]
3. 施設の基準に従って、ニードルレスコネクタのメスルアーを消毒して、使用すること。

4. 接続する機器の材質を確認し、接続部分への保護キャップ装着や、アルコール剤使用による影響が予想される場合には充分検討の上使用すること。
5. ニードルレスコネクタから取り外した本品は、廃棄し、再度接続しないこと。
6. 使用中は本製品の破損、接合部の緩みについて定期的に確認すること。
7. 接続する部分が汚染されている場合には、アルコール綿などで清拭、消毒してから接続すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 〈保管方法〉

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。2℃から25℃を逸脱しないように保管すること。

火気厳禁

## 〈有効期間〉

有効期限は製品包装に記載 [自己認証 (設計元データ) による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(文献請求先も同じ)

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

TEL：0120-8555-90 (カスタマーサービス)

外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー

(Becton, Dickinson and Company)

国名：アメリカ合衆国