

に差し込む。

注意：シリンジを斜めに差し込まないこと。[セプタムが損傷するおそれがある。]

- 4)ハウジング内が透明になるまでフラッシュする。

注意：フラッシュ後にハウジング内に薬液や血液の残留がないか確認すること。フラッシュ後も薬液や血液の残留が認められる場合には、本製品を交換すること。

- 5)本製品のハウジング部分をしっかりと保持しながら、シリンジをまっすぐ取り外す。ヘパリンロック又は生食ロックを実施する場合は、カテーテルへの血液の逆流を最小限にするために、陽圧フラッシュ法(シリンジを取り外す前にクランプを行う等)を用いる。

※INS(米国輸液看護師協会)基準では、フラッシュ溶液の量はカテーテル容量と付属のデバイスの容量を加えた量の2倍以上が必要とされている。

注意：シリンジを斜めに引き抜かないこと。

注意：シリンジ先端をセプタムに差し込んだ状態で回転させないこと。[セプタムが損傷するおそれがある。]

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- (1)使用中は本製品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れについて定期的に確認すること。体位変換後には必ず確認すること。
[患者体動等によりラインに負荷がかかるおそれがある。]
- (2)体位変換時や患者体動時等により、延長チューブ等の輸液ラインに負荷がかかった場合、チューブの破損、接続部の緩みや外れ、薬液漏れ、空気混入が生じるおそれがあるため、ラインに異常が生じていないことを定期的に確認すること。
- (3)本製品のルアー接続部とセプタム外周のオスネジ部は国際規格(ISO)のルアーフィッティング、ロックフィッティングで規定されている規格に準拠している。接続相手には必ずISO同規格に準拠したルアーを持つ輸液セット、延長チューブ、シリンジを用いること。接続相手が同規格に準拠している場合でも、接続方法や接続後の取扱い等により、接続が緩む場合が想定される。緩みやはずれが生じないようにしっかりと接続し、漏れ等の異常がないか必ず確認すること。
- (4)本製品のルアー接続部は国際規格(ISO)のルアーフィッティングで規定されているオスルアーとの接合を前提に設計されている。輸液セット、延長チューブ、シリンジを接続する際は、相手側のルアー形状や長さを確認すること。ルアーが短いデバイスを使用した場合等、セプタムが十分に開かず、流量が確保できない場合がある。
- (5)本製品に対し、金属針、ブラントカニューラ、ルアー先端が鋭利なデバイス、また明らかに欠陥のあるルアーコネクタは絶対に使用しないこと。[セプタムが損傷するおそれがある。]万一使用した場合、ただちに新しい製品と交換すること。
- (6)ひび割れ等の異常が確認された場合は、ただちに新しい製品と交換すること。
- (7)各施設の基準に従って本製品を交換すること。
※本製品の交換に関する参考資料として、血管内留置カテーテル関連感染予防のためのCDC(米国疾病管理センター)ガイドラインなどが推奨される。
- (8)スタンダードプリコーションに準じた血液体液への曝露対策を実施すること。
- (9)接液部を汚染させないこと。
- (10)コックに対し、引き抜く方向に過度な負荷を加えないこと。
[コックが外れ、液漏れが発生する可能性がある。]

*〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)〉

(1)併用注意(併用に注意すること)

本製品には、ポリカーボネートを使用している。脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れについて注意すること。これらの医薬品を投与する場合は、24時間以内に本品を交換すること。医薬品を交換する場合は、本品も同時に交換することが望ましい。[薬液によりひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入の可能性がある。特に全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温・多湿および直射日光を避けて保管すること。

〈有効期間〉

箱のラベルおよび直接の被包記載の使用期限を参照。

*【主要文献及び文献請求先】

1. 血管内留置カテーテル関連感染予防のためのCDC(米国疾病管理センター)ガイドライン
2. 医薬品とポリカーボネート製の医療用具の併用に関する自主点検について(医薬安発第0526001号)
3. Infusion Therapy Standards of Practice, Journal of Infusion Nursing January/ February 2016 Volume39, Number 1S

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

TEL：0120-8555-90(カスタマーサービス)

外国製造業者：

ケアフュージョン 303 インク

(CareFusion 303, Inc.)

国名：アメリカ合衆国