



簡単操作で、新型コロナウイルス 抗原を迅速に診断

BD ベリター SARS-CoV-2 コロナウイルス抗原キット

鼻腔ぬぐい液を用いた検査です。

15分で新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原を検出します。



新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）検査を始めましょう

BD ベリター™ システムは、操作しやすい迅速診断システムです。鼻腔ぬぐい液を使用して、信頼できる判定結果を提供し、より質の高い診断へつなげる検査を提供します。



検査プロセスを簡素化

- 1 ボタンの簡単操作で、操作ミスによるエラーを減らすことができます。



信頼できる迅速検査結果

- 判定時間 15 分
- 測定データはアナライザー内部に記録されます。BD ベリター™ インフォスキャン（別売）を用いて、測定データを PC にダウンロードすることが可能です。
- デンシトメトリー技術を用いて金コロイドの発色を測定し、イムノクロマトの感度を向上しています。独自の技術により非特異反応による偽陽性を認識し、特異度を向上させます。



選べる検査フロー

- 測定方法を「手動測定」と「自動測定」から選択することができます。
 - 手動測定**は、タイマーなどを使用して時間を計測し、判定時間経過後に BD ベリター™ プラス アナライザーで測定結果を得ることができます。複数のテストプレートを連続して測定する場合に適しています。
 - 自動測定**では、試料を添加したテストプレートを BD ベリター™ プラス アナライザーに挿入したままにすることで、本機内蔵のタイマーが時間を計測し、判定時間経過後に自動的に測定結果を表示します。測定中に他の作業を並行して行う場合に適しています。



測定結果の印刷機能

- BD ベリター™ インフォスキャン（別売）を用いてロット番号、検体 ID 及び検査記録をダウンロードし、画面に表示します。
- USB 端子とプリンター（専用 EPSON プリンターの購入が必要です）を接続すると測定結果の印刷が可能です。

1. SARS-CoV-2 迅速検出用 BD ベリター™ SARS-CoV-2 の添付文書を参照

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX:024-593-3281

bd.com/jp/

発症から8日後（発症日を1日目とする）までの試験成績¹

	対照 PCR 法		計
	陽性	陰性	
本品	陽性	29	30
	陰性	9	221
計	38	213	251

全体一致率：96.0% (241/251)
陽性一致率：76.3% (29/38)
陰性一致率：99.5% (212/213)

BD ベリター™ プラス アナライザー デンシトメトリー分析装置

販売名：BD ベリター™ プラス アナライザー
製造販売届出番号：07B1X00003000156



陰性の検査結果は SARS-CoV-2 感染の可能性を排除するものではなく、この検査結果のみをもって感染予防を含む治療や患者管理のための判断をするものではありません。陰性の場合、患者の直近のウイルス曝露、病歴及び COVID-19 に伴う臨床徴候・症状の発現との関係においてこれを考慮し、患者の管理上必要な場合、遺伝子検査を実施して陰性であることを確認してください。



BD ベリター™ SARS-CoV-2 コロナウイルス抗原キット

体外診断用医薬品

販売名：BD ベリター™ SARS-CoV-2
コロナウイルス抗原キット
製造販売承認番号：30200EZ00084000

製品名	カタログ番号	数量
BD ベリター™ システム SARS-CoV-2 (30 テスト)	256082	30 テスト
抽出試薬	30 本	付属綿棒 30 本 (BD 滅菌綿棒 CF、BD 滅菌綿棒 CA、BD FLOQ 503CS01 滅菌綿棒または BD 滅菌綿棒 Foam Tipped Applicator のいずれかが付属されます)
テストプレート	30 個	
陽性コントロール	1 本	
陰性コントロール	1 本	

使用期限：製造日より6ヶ月 貯法：2℃～30℃

価格：180,000 円（税別）

販売名：BD 滅菌綿棒 CF 製造販売届出番号：07B1X00003000126
販売名：BD 滅菌綿棒 CA 製造販売届出番号：07B1X00003000137
販売名：BD FLOQ 503CS01 滅菌綿棒 製造販売届出番号：07B1X00003000181
販売名：BD 滅菌綿棒 Foam Tipped Applicator 製造販売届出番号：07B1X00003000184

(ご注意) BD ベリター™ システム SARS-CoV-2 には「BD 滅菌綿棒 CF」、「BD 滅菌綿棒 CA」、「BD FLOQ 503CS01 滅菌綿棒」または「BD 滅菌綿棒 Foam Tipped Applicator」のいずれかが付属します。これらはロットによって異なります。

