



Arctic ジェルパッド (成人用) の サイズ選択


販売名: Arctic Sun 5000 体温管理システム
 承認・認証番号: 22700BZX00278000
 販売名: Arctic ジェルパッド
 承認・認証番号: 226ADBZX00175000

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
 ・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
 ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。


製造販売業者
株式会社メディコン
 本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541
crbard.jp

BD, the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2020 BD. All rights reserved.

2020.●●.000

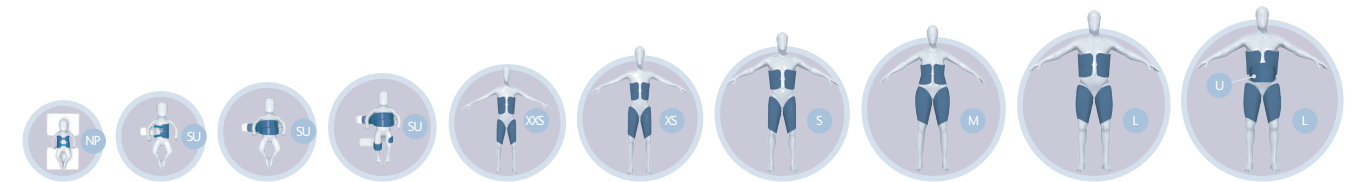

ジェルパッドは患者様に応じて正しいサイズを装着しないと冷却・加温効果を発揮しません。

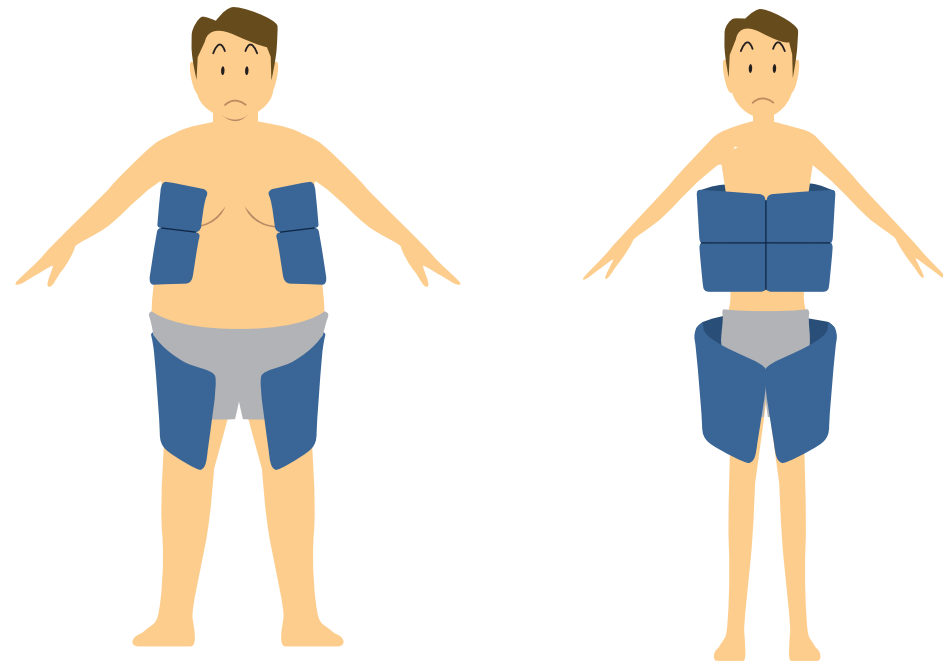


Case Study

例題

❑心肺蘇生後に搬送された以下の患者さんにArctic Sunを使用します。
どのサイズのジェルパッドを装着されますか？
●男性／45歳／身長：180cm／体重：85kg

答え：L

パッドサイズ早見表


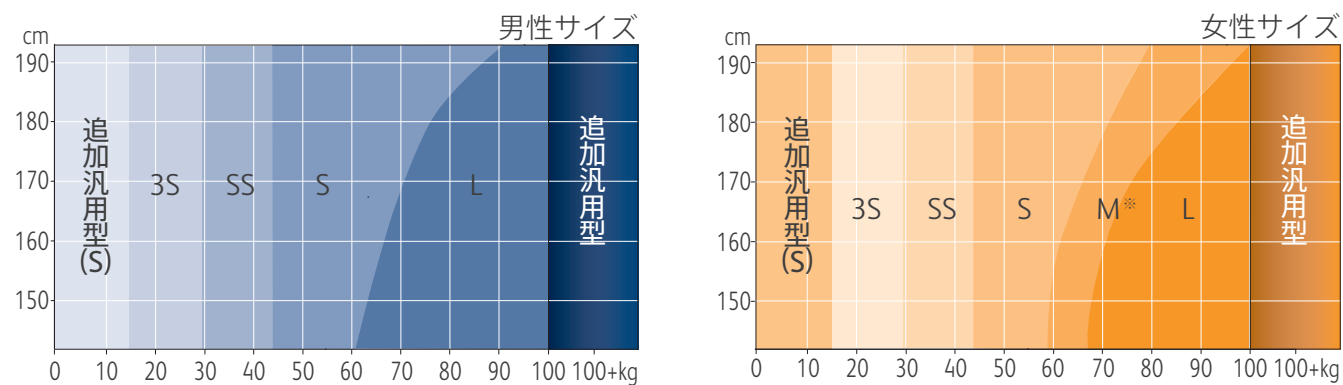


体重	身長	サイズ
16~30kg	全ての身長	3S
30~45kg	全ての身長	SS
45kg~100kg未満	サイズ表をご確認ください	S or M* or L
100kg以上	全ての身長	L+追加汎用型

※Mは上半身用がS
下半身用がLのMixになります。

装着方法 (3S・SS・S・M・Lサイズ)

上半身用[背中]

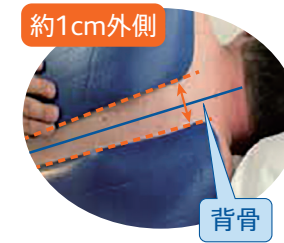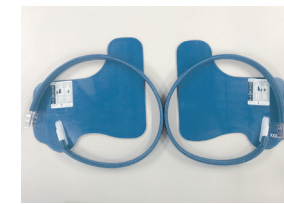


患者さんを側臥位にし、パッドの長い部分を、背骨から約**1cm**外側に合わせて貼付。
※背骨の上にパッドを貼付した場合、褥瘡が発生する恐れがあります。



パッドの短い部分を背中側から腹部側に回します。反対側も同様の手順です。

下半身用[大腿]

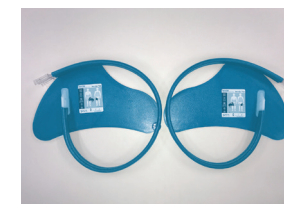

パッドの、ホースがある長い部分を、大腿部外側になるように貼付。
※鼠蹊部より上にパッドがかかった場合、腹部等に褥瘡が発生する恐れがあります。




パッドの短い部分を内腿側に回し、余りは重ね合わせます。反対側も同様の手順です。

追加汎用型の活用例



※[追加汎用型]単体では使用しないでください。

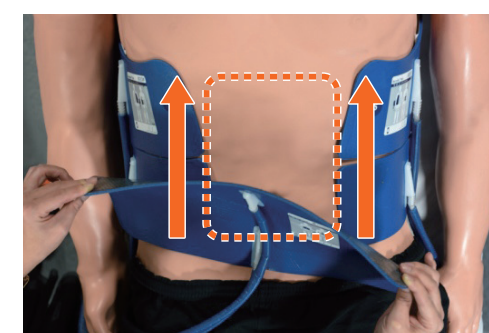

- 上半身用パッドで覆いきれていない腹部に、追加汎用型パッドを貼付。
- 余ったパッドは上半身パッドに重ね合わせます。
- ※重ねてつけても問題ありません。



失禁などでパッド表面が汚れた際は、パッドの外側から汚れを拭き取ってください。拭き取りが難しいくらい汚れてしまったパッドは、適宜『追加汎用型パッド』に交換してください。